

GWARANCJA: Burlington Medical, LLC udziela gwarancji na odzież chroniącą przed promieniowaniem przez 5 lat od daty produkcji. Sprzedawca gwarantuje, że w tym czasie odzież będzie wolna od wad materiałowych i wykonawczych oraz jest zobowiązany do naprawy i wymiany każdego wadliwego produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego zużycia, nadużycia, ścierania lub nieprzestrzegania instrukcji pielęgnacji i użytkowania. Sprzedawca niniejszym zrzeka się wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Modyfikacje odzieży wykonane przez zakład lub użytkownika powodują unieważnienie wszelkich gwarancji.

SERWIS: Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Burlington Medical, LLC pod numerem 800-221-3466, aby uzyskać pomoc z dowolnym fartuchem wymagającym uwagi.

ZWROTY: Odzież chroniąca przed promieniowaniem jest sprzedawana na zasadzie nieodwołalnej i bezzwrotnej.

NAPRAWA: Fartuchy można zwrócić w celu drobnych napraw wiązania, szwów i zewnętrznych pasków przez okres do 5 lat od zakupu. Wszystkie naprawy muszą być autoryzowane przez Burlington Medical, LLC i wymagają numeru RMA (ważnego przez 30 dni od daty wystawienia). Nieautoryzowane paczki wysłane za pobraniem NIE będą akceptowane. Po otrzymaniu odzież zostanie dokładnie wyczyszczona, a następnie oceniona pod kątem potrzebnych napraw; Właściciel zostanie powiadomiony o wszelkich związanych z tym kosztach i/lub wadach przed dokonaniem naprawy.

ZMIANY: Fartuchy szyte na miarę mogą zostać zwrócone w celu dokonania zmian w ciągu 6 miesięcy od daty wysyłki. Zmiany zgłoszone w ciągu 60 dni od daty wysyłki są bezpłatne. Zmiany zgłoszone po upływie 60 dni i przed upływem 6 miesięcy od daty wysyłki zostaną obciążone opłatą za zmianę. Nie oferujemy żadnych zmian po 6 miesiącach od daty wysyłki. Wszystkie zmiany muszą być autoryzowane przez Burlington Medical LLC i wymagają numeru RMA, który jest ważny przez 30 dni od daty wydania. Nieautoryzowane paczki otrzymane bez RMA NIE będą akceptowane.

WSZELKIE ZMIANY, NAPRAWY I PROŚBY O ZWROT NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES

OBSŁUGA KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM INFO@BURMED.COM.

KONTROLA: Odzież powinna być sprawdzona po otrzymaniu, aby upewnić się, że materiał ochronny jest wolny od wad. Zgłoszenie wad jest wymagane w ciągu 14 dni. Zaleca się coroczne badania fluoroskopowe. Wszelkie wady materiału ochronnego powinny być zgłaszane i oceniane przez inspektora ds. bezpieczeństwa radiologicznego w obiekcie. Odzież z wadami materiału ochronnego, które przekraczają kryteria akceptacji zakładu, powinna zostać wycofana z eksploatacji. Klamry, rzepy i paski ustawiają odzież w celu odpowiedniego zakrycia. Odzież z uszkodzonymi lub uszkodzonymi elementami, które uniemożliwiają prawidłowe ułożenie, powinna zostać wycofana z eksploatacji i naprawiona lub wymieniona.

ZASTOSOWANIE: Odzież chroniąca przed promieniowaniem powinna być zawsze noszona zgodnie z przeznaczeniem. Odzież ma na celu ochronę użytkownika zarówno przed promieniowaniem pierwotnym, jak i wtórnym (promieniowanie rozproszone, które jest odbijane lub ponownie emitowane przez pacjentów podczas zabiegów fluoroskopowych lub rentgenowskich). Odzież nie zapewnia pełnej ochrony przed promieniowaniem; Dlatego żadna część ciała użytkownika nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie promieniowania rentgenowskiego. Styl fartucha i poziom ochrony (Pb Eq) określają stopień pokrycia ciała i tłumienie, jakie zapewnia ubranie. Odzież i akcesoria należy zawsze nosić zgodnie z przeznaczeniem, aby zapobiec uszkodzeniom i niepotrzebnemu narażeniu.



POZIOMY OCHRONY: Odzież chroniąca przed promieniowaniem Burlington Medical, LLC jest dostępna w rozmiarach 0,25 mm, 0,35 mm i 0,50 mm Pb Eq. Odzież zawiera trwałe metki określające poziom ochrony i rozmiar. Tłumienie na wyznaczonych poziomach ochrony określa się na podstawie testów przeprowadzonych zgodnie z normą IEC 61331-1:2014.

PRZECHOWYWANIE: Fartuchy chroniące przed promieniowaniem powinny być zawieszane na ramionach lub paskach na wieszaku na fartuchu. Fartuchy rentgenowskie powinny być zwijane, a nie składane, podczas podróży. Unikaj składania, układania w stosy lub siedzenia podczas noszenia fartuchów.

Nie przechowuj odzieży w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła. Odzież należy przechowywać w temperaturach niższych niż 35°C / 95°F. Właściwe użytkowanie, czyszczenie i przechowywanie odzieży chroniącej przed promieniowaniem ma bezpośredni wpływ na jej integralność.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA: Burlington Medical, LLC zaleca, aby zakłady ustaliły udokumentowany, regularny harmonogram dokładnego czyszczenia i dezynfekcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem, aby pomóc w ograniczeniu ryzyka przenoszenia patogenów. Dokładne czyszczenie powinno być wykonywane przez profesjonalną firmę zajmującą się czyszczeniem odzieży rentgenowskiej. Dokładniejsze czyszczenie, które pomaga oczyścić i wyeliminować organizmy powierzchniowe, powinno być wykonywane między regularnymi zaplanowanymi głębokimi czyszczeniami. Postępuj zgodnie z dokładnym czyszczeniem, przecierając je zwykłą wodą. Zalecane są następujące środki czyszczące: na bazie nadtlenków (chusteczki do dezynfekcji wielu powierzchni BioXco) lub środki czyszczące zawierające następujące składniki aktywne: podchloryn sodu, 0,65% lub mniej; chlorek R-amonu, 0,25% lub mniej; R1 i R2 chlorek amonu, 0,53% lub mniej; lub nadtlenek wodoru, 0,5% - 3,0%. Zaleca się unikanie stosowania rozpuszczalników czyszczących na bazie ropy naftowej, roztworów zawierających wybielacze (podchloryn sodu powyżej 0,65%) lub środków czyszczących na bazie alkoholu. Przetestuj trwałość koloru w niepozornym miejscu. Nie zanurzać w płynach. Nie prasować. Nie używaj pralek ani suszarek. Nie czyścić chemicznie. Nie sterylizować w autoklawie. Szczegółowe instrukcje i zalecenia dotyczące czyszczenia w zależności od rodzaju tkaniny są dostępne na życzenie.

DOPASOWANIE: Wszystkie style fartuchów Burlington Medical, LLC są wyposażone w sprzączki, rzepy i/lub paski, które ułatwiają prawidłowe dopasowanie i działanie produktu. Klamry, rzepy i/lub zamki błyskawiczne powinny być zawsze wyrównane i odpowiednio przymocowane, aby bezpiecznie utrzymać ubranie na miejscu. Dostosuj w razie potrzeby, aby zapewnić utrzymanie komfortu i pożądanego pokrycia.

UTYLIZACJA: Odzież chroniąca przed promieniowaniem zawiera metale ciężkie. Podczas utylizacji produktów tłumiących promieniowanie należy przestrzegać przepisów rządowych i środowiskowych. Burlington Medical LLC ma możliwości utylizacji naszej odzieży i produktów. Wszystkie materiały bezołowiowe są produkowane bez polichlorku winylu (PVC) i są bezpieczne do utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta lub lokalnym Opiekunem Klienta.

BADANIE TYPU UE PRZEZ: Jednostka Notyfikowana Shirley Technologies (Europe) Limited, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Clonsaugh Business & Technology Park, Dublin 17, ROI, przeprowadziła badanie typu UE zgodnie z modułem B (UE) 2016/425 i wydała certyfikat badania typu UE SH00018. Są one obecnie w posiadaniu Shirley Technologies (Europe) Limited, Jednostka Notyfikowana 2895.

BADANIE TYPU W WIELKIEJ BRYTANII PRZEZ: Approved Body BTTG Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, Wielka Brytania. Przeprowadził badanie typu modułu B zgodnie z modułem B (UE) 2016/425 z późniejszymi zmianami i wprowadzonymi do prawa brytyjskiego oraz wydał certyfikat badania typu modułu B 523735. Są one obecnie w posiadaniu BTTG, Zatwierdzonego Organu 0338.

NADZÓR UE zgodnie z Modułem D (UE) 2016/425 został przeprowadzony przez Jednostkę Notyfikowaną 2895, Shirley Technologies (Europe) Limited, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Clonsaugh Business & Technology Park, Dublin 17, ROI, która wydała i posiada Certyfikat Modułu D nr 2. SH00993.

NADZÓR w Wielkiej Brytanii zgodnie z modułem D (UE) 2016/425 został przeprowadzony przez zatwierdzony organ 0338, BTTG Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 IEH, Wielka Brytania, który wydał i posiada certyfikat modułu D nr 54158.

3 Elmhurst St., Newport News, VA 23603

800-221-3466

www.burmed.com info@burmed.com